

RSUD TAPAN 	PENGUNAAN INFUSION PUMP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	060	0	1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  Dr. Elfrina Mirna NIP. 19840427 201412 2 001	
PENGERTIAN	Penggunaan alat untuk mengatur pemberian cairan pasien		
TUJUAN	menjaga pemberian cairan Parental sesuai kebutuhan pasien		
KEBIJAKAN	Dalam memberikan Asuhan Keperawatan (ASKEP) kepada pasien harus berdasarkan SPO yang tersedia		
PROSEDUR	A. Persiapan alat : 1. Infusion pump 2. Cairan / obat sesuai dengan advis dokter 3. Infus set khusus untuk infusin pump 4. Standar infus B. Pelaksanaan : 1. Letakkan infusion pump pada standar infus, pastikan bahwa alat benar-benar sudah melekat kuat 2. Tancapkan sticker listrik ke stop kontak. Perhatikan lampu “CHARGE” menyala atau tidak, bila lampu sudah menyala berarti alat sudah dapat dipergunakan (dialiri listrik) 3. Tekan tombol “POWER ON” 4. Buka pintu infusion pump 5. Masukkan infus set ke dalam tubing slot kemudian pintu ditutup kembali 6. Masukkan pengaturan tetetasan infus pada infus set 7. Program tetesan (cc) per jam sesuai advis dokter 8. Tekan tombol “STRAT” 9. Perhatikan tanda alarm yang ada pada alat : a. Occlusion : ada sumbatan b. Air on line : ada udara pada slang c. Door Open : pintu belum tertutup		

	d. Low Batt : tidak ada aliran listrik 10. Bila pasien memerlukan ekstra tetesan infus/ dipercepat tekan tombol "PURGE" 11. Apabila merubah program tetesan (menambahkan/ mengurangi) tekan tombol "STOP" dan atur program baru, kemudian tekan tombol "START" 12. Perhatikan infus jangan sampai bocor / menetes mengenai alat infusion pump karena alat akan rusak 13. Sehabis pakai alat dibersihkan dan simpan diruangan ber AC
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. IGD 3. Perinatologi 4. Anak