

RSUD TAPAN 	PEMANCAR PANAS (<i>RADIANT WARMER</i>)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 130	No. Revisi 0	Halaman 1 / 1
Pengertian	Tanggal Terbit Tgl/01/2020 Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  Dr. Elfrina Mirna NIP.19840427 2014 12 2001		
Tujuan	Pemancar panas (<i>radiant warmer</i>). Merupakan salah satu cara menghangatkan bayi dan mempertahankan suhu tubuh bayi. Terutama ditujukan pada bayi dengan berat ≤ 1500 g dan bayi sakit, juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan tindakan, atau menghangatkan kembali bayi hipotermi.		
Kebijakan	Untuk menghangatkan bayi dan mempertahankan suhu tubuh bayi agar tetap berkisar pada suhu normal dengan pemancar panas.		
Prosedur	Menggunakan pemancar panas sesuai indikasi dan dengan cara yang benar. Cara menggunakan pemancar panas : 1. Hangatkan ruangan (minimal 22°C) di mana pemancar panas akan digunakan. 2. Bersihkan matras dan alas, tutup alas dengan kain bersih sebelum bayi diletakkan dibawah pemancar panas. 3. Nyalakan alat 15 menit sebelum persalinan dipimpin dan atur suhu sesuai petunjuk (biasanya antara $36 - 37^{\circ}\text{C}$) 4. Sebelum bayi datang, nyalakan alat untuk menghangatkan matras dan alas 5. Bayi hendaknya tidak menggunakan pakaian atau dibungkus selimut, sebaiknya dibiarkan menggunakan popok atau pampers saja. 6. Bila mendapat cairan IV, hitung jumlah cairan yang diberikan (misalnya beri tambahan cairan 10%) untuk mengganti cairan yang hilang. 7. Pindahkan bayi ke ibu sesegera mungkin jika tidak ada tindakan atau pengobatan yang diberikan. agar bayi tidak kedinginan.		
Unit terkait	Instalasi Maternal-Perinatal		