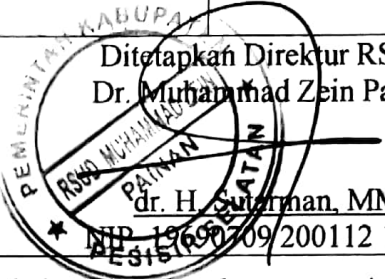


	PROSES STERILISASI BAHAN/ALAT KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN AUTO CLAVE		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Nomor Dokumen : PPI/ 049 /RSUD- PS/XI/2018 Tanggal Terbit : 6 November 2018	No. Revisi 01	Halaman 1/1 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 
Pengertian	Adalah usaha untuk membuat bahan/alat kesehatan menjadi steril dengan menggunakan mesin sterilisasi		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan penyetrilan bahan/alat kesehatan guna memenuhi kebutuhan bahan/alat kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Cek air di tabung indicator, pada saat pengisian air posisi kran sterilize, air minus, dan dry dalam keadaan terbuka 2. Bahan/alat dimasukan ke dalam auto clave yang telah disiapkan kemudian ditutup rapat 3. Setelah proses sterilisasi selesai, bahan/alat dikeluarkan dari auto clave untuk pendinginan 4. Lakukan kalibrasi auto clave secara berkala 5. Laporkan segera apabila ada kerusakan ke IPSRS untuk segera ditindaklanjuti		
Unit Terkait	- CSSD - IPSRS		