

	STERILISASI BAHAN/ALAT DARI LOGAM DENGAN MENGGUNAKAN AUTO CLAVE		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Nomor Dokumen : PPI/ 050 /RSUD-PS/XI/2018 Tanggal Terbit : 6 November 2018	No. Revisi 01	Halaman 1/1 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Suherman, MM NIP. 19690709 200112 1 001
Pengertian	Adalah usaha untuk membuat bahan/alat dari logam menjadi steril dengan menggunakan mesin sterilisasi		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan penyetrilan bahan/alat dari logam guna memenuhi kebutuhan bahan/alat dari logam steril di RSUD Dr. M. Zein Painan		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Pre cleaning alat dari logam dilakukan di ruangan masing-masing. 2. Alat yang sudah bersih, di antar ke CSSD dengan menggunakan kontainer 3. Pengantar dan penerima barang mencatat barang/alat yang akan disterilkan pada buku ekspedisi 4. Petugas sterilisasi melakukan perendaman dengan menggunakan enzimatik, pencucian dan lalu pengeringan 5. Setelah alat kering, alat di pouches dan diberi indikator dalam dan indikator luar 6. Tulis tanggal dilakukan sterilisasi di indikator luar 7. Bahan/alat dimasukkan kedalam auto clave yang telah disiapkan kemudian ditutup rapat 8. Temperatur yang dipakai 121⁰C selama 60 menit 9. Setelah proses sterilisasi selesai, bahan/alat dikeluarkan dari auto clave untuk pendinginan 10. Petugas sterilisasi memberitahukan bagian pengiriman barang/alat untuk menjemput barang/alat yang sudah steril 11. Petugas ruangan dan petugas sterilisasi menandatangani buku ekspedisi barang/alat steril		
Unit Terkait	- CSSD - Ruang Rawat Inap - Poliklinik - Kamar Operasi - ICU - Hemodialisa		