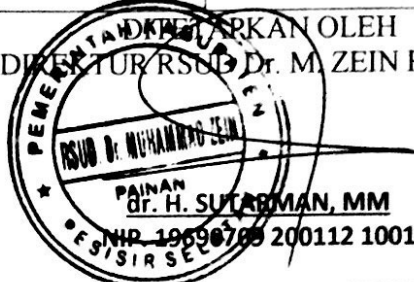


	PERSIAPAN RENALIN 3.5%			
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	No. Dokumen PP/004/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 1	Halaman 1	
	Tanggal terbit 10 Mei 2018	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN 		
PENGERTIAN	Suatu prosedur pembuatan cairan renalin 3,5 % yang digunakan sebagai desinfektan dialyzer			
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas dialyzer yang dipakai ulang 2. Mencegah tertukarnya dialyzer dari pasien lain 3. Mempermudah pelaksanaan pembuatan pakai ulang dialyzer 4. Agar lebih efisiensi serta efektifitas keamanan dalam pembuatan dialyzer pakai ulang			
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Hemodialisa di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan			
PROSEDUR	Renalin 100 ml	AAMI Quality Water (R.o)/ml	Total / ml	Solution concentration %
	35	965	1000	3.5%
	70	1930	2000	3.5%
	175	4825	5000	3.5%
	350	9650	10000	3.5%
	Masa kadaluasa renalin 3.5 % adalah 7 hari			

UNIT TERKAIT	Instalasi hemodialisa
---------------------	-----------------------